

機械器具 81 磁気治療器  
家庭用永久磁石磁気治療器 (7101600)  
**ZENLOOP 磁気炭素リング**

## 【禁忌・禁止】

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方は使用しないで下さい。
- 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性がある医用電気機器を使用している方は機器の誤作動のおそれがありますので使用しないで下さい。
- 製品より磁石がはずれた場合、小児や児童(12歳以下)及び監督を必要とする方が誤って磁石を飲み込む恐れがあります。  
※万一誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受け、指示に従ってください。
- 手首及び足首には装着しないでください。(安全面の問題ではなく、規格外の使用法となります。)

## 【形状・構造及び原理等】

原理：永久磁石の磁力をを利用して、人体に磁力線を浸透させて治療する。

形状：リング型(実製品は写真と、形状・色が異なる場合があります)



構成：ネオジウム磁石(永久磁石)、シリコーンゴム、留め具  
最大磁束密度：130mT(ミリテスラ)

## 【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。  
一般家庭で使用すること。

## 【使用方法等】

- (1)腕に直接装着してください。※手首及び足首には装着しないで下さい。(【禁忌・禁止】参照)
- (2)腕のサイズにあったものを装着してください。
- (3)留め具をはめるときは、凸凹をまっすぐ合わせ、マグネットがカチッとはまつたことを確認のうえ、着用ください。

## 【使用上の注意】

- 下記の方は医師にてご相談の上でご使用ください。
- (1)悪性腫瘍のある方
- (2)心臓に障害のある方
- (3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- (5)皮膚に感染症または創傷のある方

## 【取り扱い説明】

- お手入れの際は中性洗剤を適量にうすめてご使用のうえ、軽く手洗いし、水気を拭き取り、自然乾燥させ完全に乾いてからご使用ください。(タングラー乾燥はお避けください。)
- 汗・皮脂・汚れ等が付着した場合、水またはぬるま湯で洗い流してください。汚れ等を放置すると変色の原因になりますので、こまめなお手入れをおおすすめ致します。
- シンナー・ベンジンなどの有机溶剤でのお手入れはお避けください。
- 直射日光・高温多湿での保管はお避けください。

- (6)安静を必要とする方
- (7)体温38℃以上(有熱期)の方
- (8)ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性くとう(疼)痛性>疾患の方

- 2.他の治療器と同時に使用しないでください。
- 3.使用しても効果が現れない場合は医師又は専門家に相談してください。

- 4.使用する前には次のことにご注意ください。
  - (1)時計、磁気カード、フロッピーディスクなどの磁気影響を受けるものは近づけないでください。
  - (2)常に使用前、機器表面に異物の付着等がないかご確認の上でのご使用ください。
  - (3)磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける人は、検査の前に使用を中止してください。

- 5.使用中には次のことにご注意ください。
  - (1)身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
  - (2)装着部に発疹・発赤・かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
  - (3)機器に破損が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。

- 6.機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

- 7.機器は改造しないでください。
- 8.他の用途では使用しないでください。

## 【保管方法及び有効期間】

小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

## 【機器に係る事項】

機器が破損した場合は、すぐに使用を中止し、勝手に修理などせず、販売店もしくはお客様相談窓口までご連絡ください。

## 【製造販売業者の氏名及び名称等】

製造販売業者：株式会社大木工藝  
住所：滋賀県大津市中野3丁目4番13号



販売業者：株式会社ドリームファクトリー  
住所：大阪市北区梅田1-12-17梅田スクエアビル16F

## お客様相談窓口

0120-05-8000 10時～18時 年中無休(年末年始除く)



## 【装着方法】

留め具本体を持ち下記イラストの方法で脱着してください。

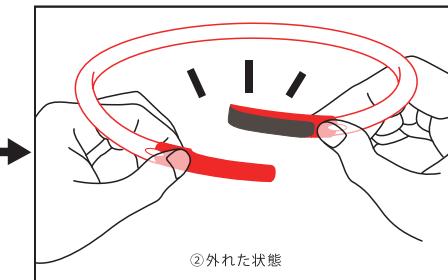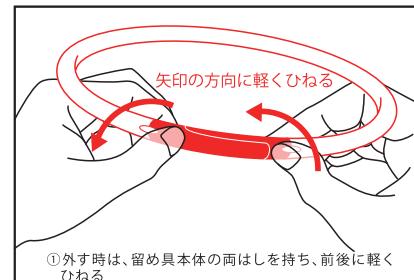


※留め具をはめる時は、凸凹をまっすぐ合わせ、マグネットが「カチッ」とはまつた事を確認の上着用ください。

## 【間違った例】

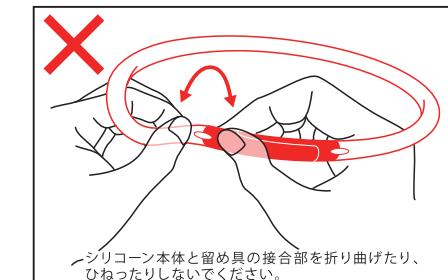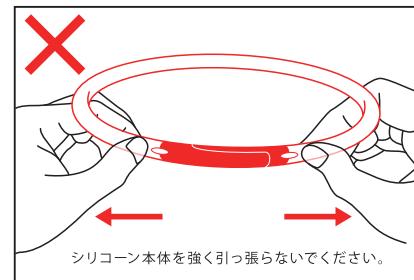

※間違った取り扱いをすると破損する恐れがあります。

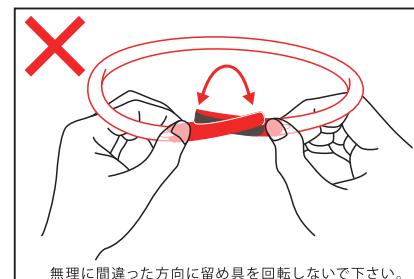

## 【お手入れについて】

経年劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくためにもこまめなお手入れをおすすめいたします。

- 汗、皮脂、汚れ等が付着した場合、水またはぬるま湯で洗い流してください。
- 又は、汚れがひどい際は中性洗剤を適量にうすめてご使用のうえ、軽く手洗いしてください。
- 洗い終われば水気を拭き取り、自然乾燥してからご使用ください。
- 入浴時の装着後、完全に自然乾燥してからご使用ください。
- 詳しく述べて【取り扱い説明】をお読みください。