



3D EYE MAGIC

■ 目 次



安全上のご注意	3~5
・ 警告	3~4
・ 注意	5
使用上のご注意	5
各部の名称	6
充電方法	7
使用方法	7
音楽を聴く	8
お好みの音楽データを取り込む	8
・ 取り込み方法【Windows をご使用の場合】	
・ 取り込み方法【Mac をご使用の場合】	
お手入れ方法	9
廃棄について	9
故障かなと思ったら	9
製品仕様	10
無償保証規定	11

安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。次の表示・図記号をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。



警告・注意について

誤った取り扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。




 警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重症を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性や物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

 分解禁止	⊙はしてはいけない「禁止」内容を示しています。 ⊙の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。 左の図記号は「分解禁止」を意味します。
 電源プラグを抜く	●は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。 ●の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示しています。 左の図記号は「電源プラグを抜く」を意味します。




警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医に相談してください。事故や体調不良、肌や目のトラブルを生じる原因になります。 ●次のような方は医師とご相談のうえ、使用してください。事故や体調不良、肌や目のトラブルを生じる原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ●頭部(顔面)に神経障害や皮膚知覚障害のある方 ●骨折や整形手術などで頭部(顔面)にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方 ●事故などによる頭部および眼科の後遺症がある方 ●強度近視(病的近視)の方 ●白内障、緑内障、網膜はく離、眼底出血、飛蚊症など目に病気のある方 ●眼圧が高いもしくは低い方 ●目の手術を行った方 ●熱さを自覚できない方 ●心臓疾患の方 ●急性疾患の方 ●有熱性疾患の方 ●血圧異常の方 ●血栓症の方、重度の動脈瘤や急性静脈瘤のある方 ●悪性腫瘍のある方 ●妊娠中および出産直後の方 ●アレルギー体質の方 ●化学繊維でかぶれた経験のある方 ●皮膚炎およびアトピー性皮膚炎の方 ●敏感肌の方 ●温度感覚喪失が認められる方 	 必ず守る <ul style="list-style-type: none"> ●次のときには使用しないでください。体調不良や肌のトラブルを生じる原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ●頭部体調がすぐれないときや、発熱している場合 ●傷、湿疹、はれものやニキビなど、肌に疾患のある場合 ●皮膚炎、強い日焼けなど、肌に異常のある場合 ●本体やACアダプタ、USBコードに次のような異常があった場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。 <ul style="list-style-type: none"> ●煙が出たり、異常に熱い場合 ●異常なおいや音がする場合 ●内部に水や異物が入った場合 ●本体が破損した場合
		 分解禁止 <ul style="list-style-type: none"> ●本製品の分解、改造、修理は絶対にしないでください。事故や故障の原因になります。

警告

 禁止	●肌や髪が濡れた状態で使用しないでください。	 禁止	●USBコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。ショートによる火災、感電、事故の原因になります。
 水濡れ禁止	●本製品は防水ではありません。入浴中は使用しないでください。また、雨や水しぶきのかかる場所、屋外での使用、充電はしないでください。感電、故障の原因になります。	 必ず守る	●USBコードが破損したり、芯線が露出したら、使用を中止し、新しいものと交換してください。そのまま使用すると、ショートによる火災、感電、事故の原因になります。
 ぬれ手禁止	●本製品は防水ではありません。濡れた手で触れたり、ACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になります。	 禁止	●本製品のプラグや隙間にピンを刺したりゴミを付着させないでください。ショートによる火災、感電、ケガの原因になります。
 電源プラグを抜く	●雷が鳴り始めたらACアダプタをコンセントから抜いてください。落雷による火災や感電の原因となります。	 禁止	●本製品を装着中は、ほかの作業をしたり眠らないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
 禁止	●付属のACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属のACアダプタは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。	 必ず守る	●ACアダプタのプラグが傷んでいたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプタを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口に修理を依頼してください。
 禁止	●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。火災の原因になります。	 禁止	●次のような場所での使用および保管はおやめください。事故やケガ、故障の原因になります。 ●乳幼児や小さなお子様、ペットの手の触れる場所 ●暖房器具の近く ●直射日光が当たる場所や車内など高温になる場所 ●水のかかる場所 ●高温高湿の場所 ●ほこりの多い場所 ●振動や衝撃の加わりやすい場所 ●強電磁界下
 禁止	●本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。 ●加熱や火中投下 ●高温環境での充電、使用、放置 ●こたつや布団の中に入れてのご使用、充電 ●毛布などを被せてのご使用、充電 ●直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温な場所での使用、充電	 必ず守る	●ご使用前に、本体やACアダプタなどに破損がないか確認してください。破損が発見された場合は使用しないでください。
 禁止	●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。	 必ず守る	●ご使用前に、操作ボタンやタイマーが正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。

⚠ 注意


 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 温熱を長時間使用しないでください。比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ部位に触れていると、低温やけどの原因になります。	 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、重いものをのせないでください。故障の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● つけまつげやまつげエクステ、コンタクトレンズ、イヤリングなどのアクセサリやメガネ、ヘアピン、ウィッグは必ず外してから使用してください。肌や目のトラブルを生じる原因になります。	 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">● 充電が終了したら、ACアダプタをコンセントから抜いてください。湿気、ホコリなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● ベルトで本体を固定して使用してください。落下によるケガや故障の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">● お手入れをする際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてから行ってください。感電や事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● miniUSBポートのカバーや開閉部、本体の隙間などに手や指を挟まないようご注意ください。		<ul style="list-style-type: none">● 本製品にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの市区町村の廃棄処分方法に従ってください。

使用上のご注意


- 1日1回、約15分以上は使用しないでください。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。
- 過度なご使用は体調不良や、目や肌のトラブルを生じる原因になります。
- 使い始めは体調や肌の様子を見ながら、時間や回数を調整しながら使用してください。
- 目薬を使用した際は、点眼後しばらく経ってから使用してください。
- 目元パックやフェイスパックとの併用はおやめください。
- 目や目の周囲が熱すぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- メイクをされたまま使用されると、メイクが落ちたり、本体に色移りする場合があります。
- ご使用後は顔に本体の跡が残る場合があります。お出かけ中やお出かけ前に使用される場合はご注意ください。
- ご使用后、目や目の周囲が温まると、一時的に目や目元が赤くなる場合がありますが、時間が経つと薄くなりますので問題ではありません。症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。
- 充電中は使用できません。

■各部の名称

本体

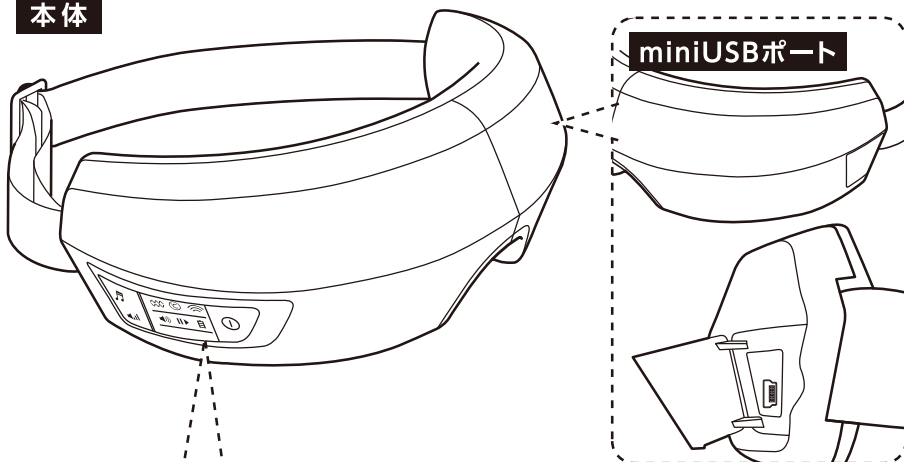


操作表示部

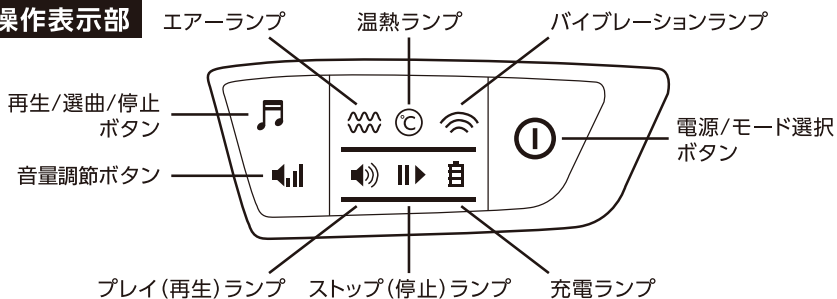

付属品


USBコード

miniUSBプラグ
(mini-Bタイプ)

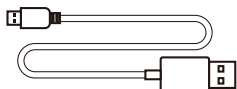


USBプラグ

ACアダプタ

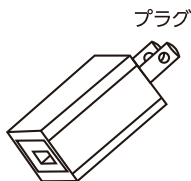


USBポート

オリジナル(専用)ケース

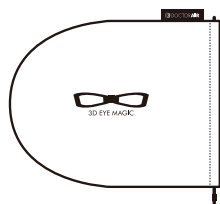

■ 充電方法

- ① 本体右側にある、miniUSBポートのカバーを開き、付属のUSBコードのminiUSBプラグを本体のminiUSBポートに差し込んでください。

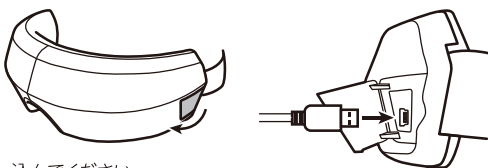

- ② USBプラグを付属のACアダプタに差し込んでください。
③ ACアダプタのプラグを家庭用コンセント(AC100V)に根元までしっかりと差し込んでください。

- ④ 操作表示部の充電ランプを確認してください。

正しく充電されていると充電ランプが青く点滅します。

※ 本体作動中に充電した場合、作動を終了して充電を開始します。



- ⑤ 充電が終了したら、ACアダプタを家庭用コンセントから引き抜き、本体とACアダプタからUSBコードを取り外してください。

約3時間で充電が完了します。充電が完了すると充電ランプが青く点灯します。

充電電池が消耗すると運転が停止し、操作表示部のランプが全て青く点滅した後、消灯します。再度充電を行ってください。


■ 使用方法

※ 充電中は使用できません。ご使用の際はUSBコードを本体から外してください。

- ① ① ボタンを長押しして電源を入れます。
電源を入れると毎回「エア+温熱」からスタートします。使用中のモードが青く点灯します。



- ② ① ボタンを押し、モードを選択してください。ボタンを押すごとに以下のように動作が変わります。

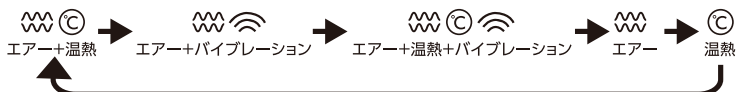


- ③ 本体を装着してください。

目を閉じ、仰向けや椅子に座って使用してください。必ずベルトで本体を固定してください。本体を逆さにして装着したり、うつ伏せになって使用したりしないでください。

- ④ 約15分後に自動停止します。

途中で電源を切る際は、全てのランプが消灯するまで ① ボタンを長押ししてください。

- ベルトの長さ調節のしかた
バックル部分でベルトを引き上げ、左右に引っ張って調節します。

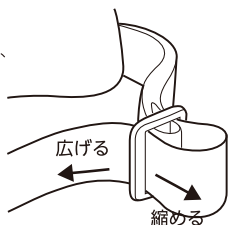

■ 音楽を聴く

ご購入時に本体に収録されている曲を聴くことができます。また、お好みの曲をパソコンから取り込んで聴くことができます。(プリセット内蔵曲数:4曲)

① ①ボタンを長押しして電源を入ると、1曲目から自動で再生されます。

② ②ボタンを押して、お好みの曲を選択してください。

押した回数だけ次の曲に進みます。

選択した曲がリピート再生されます。

④ 音量調節ボタンで、音量を5段階に調節することができます。

曲送り、全曲リピート、一時停止はできません。

③ 曲を停止する際は、ストップ(停止)ランプが青く点灯するまで②ボタンを長押ししてください。また、電源を切ると曲も同時に停止します。



■ お好みの音楽データを取り込む

お好みの曲をパソコンから取り込んで聴くことができます。

取り込みを開始する前に次のことをご確認ください。

- ご購入時に収録されている曲を削除すると、復元することはできません。事前にバックアップ保存していただくことをお勧めします。
- データの破損や損失などについては、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 再生可能なMP3ファイルは以下のとおりです。
 - ・MPEGオーディオ:MPEG1 Layer 3
 - ・ビットレート:32Kbps~320Kbps
- メモリー容量は最大で128MBになります。
- 曲の再生順はFAT順(本体に曲を取り込んだ順)になります。曲名のアルファベット順にはなりませんのでご注意ください。また、曲の追加・削除を繰り返すと、再生順が入れ替わることがあります。
- 曲は本体直下のフォルダに保存してください。

取り込み方法【Windowsをご使用の場合】

- ①パソコンのデスクトップ上あるいは「スタート」メニュー内の「コンピュータ」を開いてください。
Windows Vistaをお使いの場合は「コンピュータ」
Windows 8.1をお使いの場合は「PC」と表示されています。
- ②本体右側にある、miniUSBポートのカバーを開き、付属のUSBコードのminiUSBプラグを本体のminiUSBポートに根元までしっかりと差し込んでください。
- ③USBプラグをパソコンのUSBポートに接続し、「コンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが増えることを確認します。
- ④「リムーバブルディスク」を開き、パソコンに保存されているMP3ファイルをドラッグ&ドロップして、本体にコピーします。
- ⑤コピーが終了したら、本体とパソコンからUSBコードを取り外してください。

取り込み方法【Macをご使用の場合】

- ①本体右側にある、miniUSBポートのカバーを開き、付属のUSBコードのminiUSBプラグを本体のminiUSBポートに根元までしっかりと差し込んでください。
- ②USBプラグをパソコンのUSBポートに接続し、デスクトップに「NO NAME」アイコンが増えることを確認します。
- ③「NO NAME」を開き、パソコンに保存されているMP3ファイルをドラッグ&ドロップして、本体にコピーします。
- ④コピーが終了したら、「NO NAME」のアイコンをドラッグ&ドロップしてゴミ箱に入れ、本体とパソコンからUSBコードを取り外してください。

■ お手入れ方法

必ず電源を切り、ACアダプタとUSBコードを外してからおこなってください。乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少量含ませたやわらかい布で拭き、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。水洗いは絶対にしないでください。アルコール、ベンジン、シンナー、除光液などは使わないでください。故障や変質の原因になります。

■ 廃棄について



Li-ion

この製品には、リチウムイオン充電電池を内蔵しております。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

■ 故障かなと思ったら

こんなとき	対処方法
電源/モード選択ボタンを押しても動かない	● 充電電池が消耗している場合があります。充電を行ってください。
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	● 周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。充電は周囲10℃～40℃で行ってください。 ● 初めての充電や長期間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。
途中で停止する	● 電源を入れたあと、約15分で自動停止します。異常ではありません。 ● 充電電池が消耗している場合があります。充電を行ってください。
パソコンに接続してもフォルダが表示されない	● 両方の USB プラグが根元まで差さっているかご確認ください。
取り込んだ曲が再生されない	● MP3形式以外の音楽ファイルを取り込んでいないかご確認ください。 ● 曲を保存しているフォルダの階層が深いと、再生されない場合があります。本体直下に曲を取り込みなおしてください。
取り込んだ曲の曲順がずれる	● 本体に取り込んだ順番で再生されます。再生したい順番に曲を取り込みなおしてください。

上記の方法でも直らない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

■ 製品仕様

本体

販売名	3D EYE MAGIC (ウルトラセブン)
型番	EM-002LUS
電源	充電式(リチウムイオン充電電池内蔵3.7V 1300mAh)
充電時間	約3時間(満充電まで)※
充電可能回数	約300回※
連続使用時間	約110分(満充電の場合)※
定格使用時間	約15分
温熱時の表面温度	約38℃
使用環境温度	10~40℃
寸法	W200×H80×D120mm
重量	305g(本体のみ)
付属品	USBコード、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、オリジナル(専用)ケース
生産国	中国

※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。

ACアダプタ

定格入力	AC 100-240V(50/60Hz) 0.25A
定格出力	DC 5V 1A
モデル名	PS06B050K1000JU

●内蔵バッテリーの交換について

内蔵バッテリーには、充電可能回数(電池寿命)がございます。十分に充電を行っても充電できない、または充電持続時間が短い場合は、まずP9の「故障かなと思ったら」の対処方法を行ってください。対処方法を行っても、改善されないときは、電池の寿命になります。その際は有償にて内蔵バッテリーの交換を承ります。お客様ご自身では行わず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

無償保証規定

1. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無償修理させていただきます。
※無償修理をご依頼になる場合には販売店に商品と本書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無償修理をお受けになれない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。保証期間内でも次の場合には原則として有償になります。
2.
 - (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - (4) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (7) 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
 - (8) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定以外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷
 - (9) 弊社 (および弊社関連会社) 以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - (10) 生地 of 損耗による縫製破れ
 - (11) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
 - (12) 摩耗や劣化などによる有寿命部品の交換
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 有償修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件をもとにおいて無償修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期限は製造終了から5年です。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

DOCTOR AIR

A MAN of ULTRA

故障・修理のお問い合わせ

ドクターエアお客様相談窓口

 0120-05-8000

10時～18時 年中無休(年末年始除く)

株式会社ドリームファクトリー

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-12-17 梅田スクエアビル 16F

© A MAN of ULTRA