


# 3D NECK MASSAGER MINI

3Dネックマッサージャーmini MN-07

| 取扱説明書 |  
添付文書

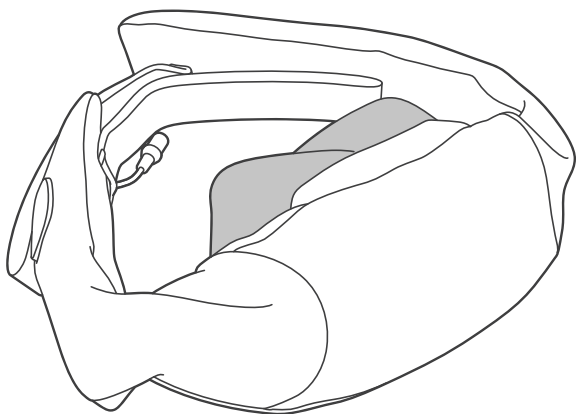

このたびはドクターエアME製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

*Doctorair*  
ME

# 目次

安全のために .....	3
各部の名称と付属品 .....	11
充電する .....	13
3D ネックマッサージャー mini を使用する .....	16
お手入れと保管について .....	18
故障かなと思ったら .....	20
主な仕様 .....	21
保証とアフターサービス .....	24

# 安全のために

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

## 警告・注意について

誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



### 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



### 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

## 図記号の例

お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



分解禁止

⊘は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するマークです。⊘の中や近傍に具体的な禁止内容を絵や文章で示していません。左の図記号は「分解禁止」を意味します。



電源プラグを抜け

●は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するマークです。  
●の中や近傍に具体的な指示内容を絵や文章で示していません。左の図記号は「電源プラグを抜け」を意味します。

## 警告



- 本製品は家庭用マッサージ器です。他の目的には使用しないでください。
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させないでください。ケガや思わぬ事故の原因になります。
- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。症状を悪化させる原因になります。例：心臓疾患、急性疾患、有熱性疾患、血圧異常、血栓（塞栓）症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）、頸椎症、飲酒や薬を服用中の方・化学繊維でかぶれた経験のある方・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など
- 首の周辺に使用するときには特に注意し、首の前方および頭部には使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- 使用中はほかの作業を行わないでください。事故やケガの原因になります。
- アクセサリーなどの装飾品や、マフラーなどを着けたまま使用しないでください。事故やケガの原因になります。
- マッサージ器本体のカバーを故意に外したり、破れた状態で使用することは非常に危険ですので、絶対にしないでください。
- お子さまに使用させないでください。また、本体の上で遊ばせたり乗せたりしないでください。また、乳幼児を機器に近づけさせないでください。思わぬ事故の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。火災の原因になります。

## 警告



禁止

- 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属のACアダプタは本製品専用です。他の機器には絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- マッサージ器本体や、アダプタジャックなどにピンのような鋭いものや異物を挿し込まないでください。火災や感電、事故の原因になります。
- ACアダプタのコードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、コードに重いものをのせたりはさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因になります。
- ACアダプタのコードをマッサージ器本体や、ACアダプタの本体に巻き付けしないでください。断線による火災や感電の原因になります。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
  - ・加熱や火中投下・高温環境でのご使用、充電、放置・こたつや布団の中に入れてのご使用、充電・毛布などを被せてのご使用、充電・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所でのご使用、充電
- 電池性能の劣化や異常を感じたとき\*は使用を中止しドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。  
\*使用できる時間が短くなった、充電できなくなった、など。






## 警告

- 次の方は必ず医師とご相談の上、使用してください。
  - ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している方
  - ・悪性腫瘍のある方
  - ・心臓に障害のある方・脚部に重度の血行障害がある方
  - ・温度感覚喪失が認められる方
  - ・妊娠中や妊娠の可能性がある方、出産直後の方
  - ・糖尿病など、高度の末しょう循環器障害による知覚障害のある方
  - ・施療部位に創傷のある方
  - ・安静を必要とする方や体力の衰えた方
  - ・体温38℃以上(有熱期)の方 / 例：急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき
  - ・高血圧の方
  - ・骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の方
  - ・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方
  - ・腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、背骨に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方
  - ・医師の治療を受けている方・上記以外に特に身体の異常を感じている方
- 次の部位に使用する際は医師にご相談ください。
  - ・整形手術をした部位
  - ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
  - ・皮膚トラブルのある部位 / 例：アトピー性皮膚炎、顔面黒皮症、皮膚の炎症、かゆみやほてりのある部位、物理的的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など
  - ・痛覚、知覚障害を起こしている部位・胸部、陰部、頭部・背骨部位、関節部位、骨折部位
- ご使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした場合や、使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす原因になります。
- ご使用前に必ず布地が破れていないか、ファスナーが開いていないか確認してください。どんな小さな破れでも見つけた場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。感電やケガの原因になります。



必ず守る

## 警告

 <p>必ず守る</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●ご使用前に、操作ボタンなどが正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。異常が発見されたときは、そのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。</li><li>●ACアダプタをコンセントや、マッサージ器本体のアダプタジャックなどに挿し込む際は、根元までしっかりと挿し込んでください。</li><li>●ACアダプタをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。絶縁不良になり、火災、感電、ショートによる発火の原因になります。</li><li>●使用時間は1回約10分にしてください。長時間使用すると逆効果やケガの原因になります。</li></ul>
 <p>電源プラグを抜き</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●ACアダプタのコードやプラグが傷んでいたり、コンセントへの挿し込みがゆるいときは、直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプタを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因になります。</li><li>●本体および、ACアダプタから異常音や異臭・煙が発生したら、直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプタを抜いて、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。そのまま使用を続けると火災や感電・事故の原因になります。</li></ul>
 <p>ぬれ手禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品は防水ではありませんので、濡れた手で本体および、ACアダプタには触れないでください。感電の原因になります。</li></ul>
 <p>風呂、シャワー室での使用禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品は防水ではありませんので、風呂場など水のかかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。漏電によって、感電や発火の原因になります。</li></ul>
 <p>分解禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品の分解・改造は絶対にしないでください。感電やケガの原因になります。</li><li>●内蔵されたリチウムイオン充電電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。</li></ul>

## 注意



禁止

- 他の治療器と同時に使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。
- 本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ご使用中の飲食はおやめください。
- 湿疹が出ているときのご使用はおやめください。
- マッサージ器本体の上に乗ったり、立ったり、座ったりしないでください。ケガや故障の原因になります。
- 体重をかけた状態でのご使用はおやめください。また、布団の中でのご使用はおやめください。
- ご使用中に眠らないでください。事故やケガの原因になります。
- ご使用中に、もみ玉を故意に強く押し当てるなどの無理な力はかけないでください。ケガや体調不良、故障の原因になります。
- 飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。事故やケガの原因になります。



必ず守る

- テーブルタップでご使用・充電される際は、必ず定格容量をお守りください。火災や故障の原因になります。
- 食前・食後のご使用は、十分に時間をあけてから使用してください。
- 使い始めは弱い刺激からマッサージを開始してください。



## 注意



電源プラグを抜く

- お手入れをする際は、必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いた状態で行ってください。感電や事故の原因になります。
- 停電したときは、直ちに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントから抜いてください。湿気・ホコリなどで絶縁不良になり、火災や漏電の原因になります。
- 落雷による火災や感電の原因になりますので、雷がなり始めたら直ちに充電を中止してください。

## 性能及び安全性に関する規格

### 性能

項目	仕様	備考
もみ回数：もみ機能をもつ機器	低速：25 回／分 (±5回) 高速：35 回／分 (±5回)	試験方法：JIS T2002

### その他の性能

項目	仕様	備考
タイマー	10 分(±10%)	試験方法：JIS T2002


### 使用目的又は効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

※上記以外の目的には使用しないでください。

# 各部の名称と付属品

## 本体

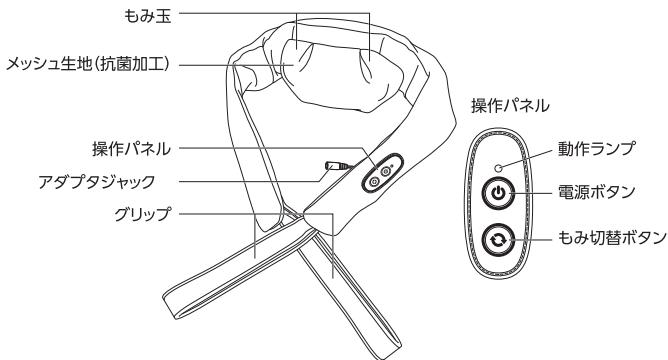

### 動作ランプ

充電状態と電池残量を表示します。

### 電源ボタン

押すたびに、電源 ON、OFF が切り替わります。

### もみ切替ボタン

押すたびにもみ玉の回転スピードおよび回転方向が切り替わります。

### アダプタジャック


充電時にACアダプタを接続します。

## 付属品

取扱説明書  
(本書・保証書付)



ACアダプタ

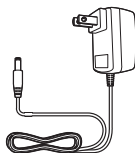

# 充電する

---

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順でACアダプタを取り付け、充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。


## 充電する前に

- ご使用前に本体やACアダプタに損傷がないか確認してください。
- 異常が発見された場合はそのまま使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
- ACアダプタのコードを束ねた状態で使用しないでください。
- 内蔵充電池には充電可能回数(電池寿命)があります。十分に充電を行っても充電できない、または充電持続時間が短い場合は、電池寿命となります。その際は、有料にて内蔵充電池の交換をお受けいたします。お客様自身では絶対に行わず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

## 充電するには

- 1 本体のアダプタジャックに、ACアダプタを接続します。  
奥までしっかりと挿し込んでください。

- 2** 家庭用コンセントにACアダプタの電源プラグを根元までしっかりと挿し込みます。

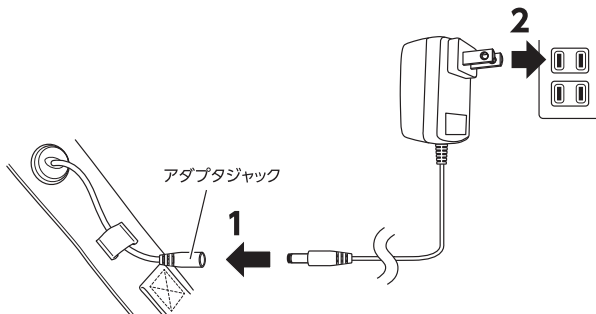

※充電中に作動させた場合は充電されません。電源が切れると再度充電を開始します。

- 3** 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントと本体の両方から外してください。

## 動作ランプについて

電池残量によって下記の順に変わります。

	充電時	動作時
青点灯	満充電時	電池残量 多
青点滅	電池残量 多	
赤点灯	電池残量 中	電池残量 中
赤点滅	電池残量 少	電池残量 少

※満充電後、3分後に消灯します。ACアダプタのコードを本体から抜く

- 14 と3秒間点灯後、消灯します。

## コンセントにつないでご使用の場合は

コンセントに挿し込んだACアダプタを本体につないだままご使用ください。

ACアダプタからの電源で動作します。この場合動作中は充電されません。

### ご注意

- 初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。
- 充電が空の状態から満充電まで約2時間かかります。

# 3Dネックマッサージャー miniを使用する

## ご使用になる前に

- ご使用前に、電源ボタンなどが正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。
- ご使用前に、必ず布地が破れていないか、ファスナーが開いていないかを確認してください。どんな小さな破れでも、見つけた場合は絶対に使用しないでください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」(13ページ)をご覧ください。
- ACアダプタを接続してもご使用できます。ACアダプタを接続してのご使用時は充電されませんのでご注意ください。
- 機器を連続して動作させるような使い方はおやめください。
- カバーが破れた場合は使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。(※カバーは取り外しできません。)


## 使用するには

### 1 電源ボタンを押して、電源を入れます。

もみ玉が下方方向に回転し、マッサージが開始します。

もみ切替ボタンを押すと、もみ玉の回転スピードおよび回転方向が替わります。

押すたびに次のように動作が変わります。

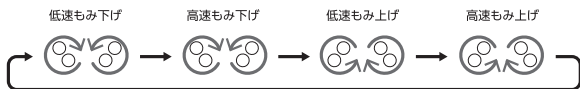

※本体カバーのファスナーを下側にして見た場合



**2** 本体を使用したい部分に当て、マッサージをします。ご使用の際はグリップを持つと便利です。

**ご注意**

- 使い始めは弱い刺激(低速)から開始してください。
- 首周辺をマッサージする際は、強く押し当てないように十分に注意してください。また、首の前方・頭部・胸部・陰部には使用しないでください。
- マッサージ器本体の上立ってご使用になったり、全体重がかかるようなご使用はおやめください。
- 髪の毛の方がご使用する際は、髪を束ねるなどしてマッサージ器に髪がかからないようにしてください。マッサージ器との摩擦や擦れなどにより、髪の毛をいためる恐れがあります。

約10分後に自動でマッサージが終了します。

途中でコースを切り替えても、約10分で停止します。

**途中でマッサージを終了するには**

電源ボタンを押してください。

# お手入れと保管について

---

## お手入れについて

### ご注意

- お手入れの前に、必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

乾いたやわらかい布で、汚れをふき取ってください。

汚れがひどい場合は、水で濡らしてかたくしぼったスポンジや、やわらかい布でふき取ってください。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

## 保管について

- 保管の際は、必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 汚れやほこりをよくふき取り、浴室などの水場や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所は避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所での保管はおやめください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- ACアダプタのコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。

## 廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細内容は、各地方自治体にお問い合わせください。付属のACアダプタやUSBコード、アタッチメントなどその他付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

## 故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>安全装置が作動している場合があります。1時間ほど置いてから再度お試しください。</li><li>十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。または、ACアダプタを接続してご使用ください。</li></ul>
もみ玉の動きが遅い・弱い	<ul style="list-style-type: none"><li>十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。または、ACアダプタを接続してご使用ください。</li></ul>
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"><li>周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃で充電を行ってください。</li><li>初めての充電や長期間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。</li><li>ACアダプタを接続していても、動作中は充電できません。電源を切り、充電されているかご確認ください。</li></ul>
突然停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>タイマーにより約10分で自動的に停止します。</li><li>もみ玉に負荷がかかったり内部温度が上昇すると、安全装置により動作が一時停止します。1時間ほど置いてから、再度お試しください。</li></ul>
異音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。</li></ul>

上記の方法でも解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

# 主な仕様

## 本体

製品名	3Dネックマッサージャー mini MN-07
型番	MN-07ME
類別	機械器具 77バイブレーター
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード: 34662000)
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	305AHBZX00009000
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電源	充電式リチウムイオン充電電池 7.2V 2000mAh / DC9V 2.0A (ACアダプタ使用時) ※ ACアダプタ接続でも動作します
定格入力	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	18 W
充電時間*	約 2.5 時間
充電可能回数*	約 300 回
もみ回数*	高速: 35 回/分 (±5 回) 低速: 25 回/分 (±5 回)
タイマー	約 10 分
使用環境温湿度	+10℃ ~+40℃ 30 ~ 85% RH
保管環境温湿度	0℃ ~+40℃ 10 ~ 85% RH

寸法	約 W350×H450×D110mm
質量	約 1.0 kg (本体のみ)
付属品	AC アダプタ、取扱説明書(保証書付)
原材料	ABS、ポリエステル、POM (ポリアセタール)、 PU (ポリウレタン)、ナイロン
製造販売元	株式会社ドリームファクトリー 大阪府大阪市北区梅田 1-12-17 JRE 梅田スクエアビル 16 階 許可番号：27B2X00274
製造元	Zhejiang E-cozy Electronic Technology Co.,Ltd セッコウイーコージエレクトロニックテクノロ ジーカンパニーリミテッド Bldg 12, No.355 Binhai Twelve Branch Wenzhou Economic and technological Development Wenzhou Zhejiang China
製造国	中国

\*実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。

## ACアダプタ

モデル名	定格入力	定格出力
E36-0900-2000LJ	AC100-240V ~ 50/60Hz 0.8A	DC9V 2.0A

## ●内蔵充電電池の交換について

内蔵されたリチウムイオン充電電池は充放電可能回数(電池寿命)がごぞいます。十分に充電を行っても充電できない、または電池持続時間が短い場合は、まず「故障かなと思ったら」(20ページ)をご確認ください。対処方法を行っても改善されないときは、電池の寿命になります。その際は有料にてリチウムイオン充電電池の交換を承ります。お客様ご自身では行わず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

## ●抗菌加工について

試験機関	: 一般財団法人 カケンテストセンター
試験方法	: JIS L1902 :2015 菌液吸収法
抗菌方法と場所	: もみ玉部分のメッシュ生地に抗菌加工剤を浸漬
試験結果	: 抗菌活性値 2.2以上

※製品の仕様およびそのデザインは性能・機能向上のため、予告なく変更する場合があります。

# 保証とアフターサービス

---

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

## 保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。

また、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

## 修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」（20ページ）をご確認ください。解決しない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合はACアダプタを外し、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- お買い上げ日
- 製品型名：MN-07
- 故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関する  
お問い合わせ



## 保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間：保証書に記載

## 保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 修理品の運賃：修理品の往復の送料



## 補修用性能部品の保有期間


本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。

保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

## その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

## 愛情点検のお願い

長年ご使用の3Dネックマッサージャー miniの点検をお願いします		
 愛情点検	<b>こんな症状はありませんか？</b>	<b>ご使用中止</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●煙が出たり、異常なおいや音がする</li><li>●ACアダプタが異常に熱い</li><li>●ACアダプタのコードを動かすと、通電したりしなかったりする</li><li>●内部に異物や水が入った</li><li>●本体やカバー、ACアダプタに変形や破損がある</li><li>●その他異常がある</li></ul>	故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプタを外して、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口にて点検、修理をご相談ください。

## 無料保証規定


1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理させていただきます。ただし、離島または離島に準ずる遠隔地での修理に要する交通費、宿泊費、送料(往復共)などはお客様のご負担となります。  
※保証期間内に無料修理をご依頼になる場合には販売店に本製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。  
※ご転居やご贈答品などで、本保証書に記載の販売店での無料修理をお受けにできない場合には、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
  - (1) 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
  - (2) 不当な修理や改造による故障および損傷
  - (3) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
  - (4) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
  - (5) 保証書のご提示がない場合
  - (6) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、ご住所、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (7) 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷
  - (8) 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
  - (9) 弊社(および弊社関連会社)以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
  - (10) 消耗品、本体以外の付属品の消耗
  - (11) 磨耗や劣化などによる有寿命部品の交換
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。有料修理の場合、修理品の運賃・修理部品代・技術料・出張料はお客様にてご負担願います。

修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は販売店またはドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。

故障・修理のお問い合わせ

| ドクターエアお客様相談窓口 |

 0120-05-8000

10時～18時 年中無休(年末年始除く)

 DOCTORAIR

| 製造販売元 | 株式会社ドリームファクトリー

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-17 JRE梅田スクエアビル16階

