

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001（JMDN コード）
ドクターエア リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じたら、使用を中止すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、衣類形状の医療機器であり、上半身用（上腕部被覆）・下半身用（大腿部被覆）の種類がある。サイズはそれぞれM、L、XLの3つがある。

①上半身用（上腕部被覆）


ドクターエア リカバリーTシャツ



	M	L	XL
着丈	69.5	72.5	75.5
肩幅	45	46.5	48
身幅	54	56	58
袖丈	24	26	28

②下半身用（大腿部被覆）

ドクターエア リカバリーハーフパンツ

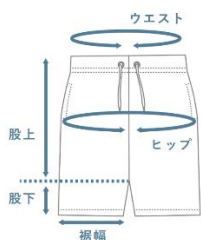

	M	L	XL
ウエスト	77-85	83-91	89-97
ヒップ	103	109	115
股上	28	29	30
股下	22	24	26
裾幅	26	28	29

2. 原理

本品は原材料生地に備長炭類似燐炭、微量のラジウム鉱石、ゲルマニウム鉱石および高純度シリカを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線領域の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する衣類型の医療機器である。

【使用目的又は効果】

生地に鉱物等による特殊な加工が施されており、一定程度の遠赤外線を輻射することにより、血行促進作用をもたらし、疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

【使用方法】

- ・本品に破損がないことを確認する。
- ・衣類として着用する。
- ・日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能である。
- ・本品の効果には個人差があるため、20日以上での長期着用が望ましい。
- ・睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。
- ・本品は再使用可能である。

【使用上の注意】

- ・着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、ただちに使用を中止すること。
- ・湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- ・長時間水に浸したり、濡れたまま重ねておくと、単色部分や他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- ・本品に、破損（ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着すること。
- ・破損がある場合は使用しないこと。
- ・漂白剤の使用は避けること。
- ・乾燥機の使用は避けること。
- ・長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- ・目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除くこと。
- ・湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があるので注意すること。
- ・眠気が現れることがある。眠気を感じたら自動車の運転や危険を伴う作業などを控えること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- ・しばらく使用しないときは一度干してから、湿気の無い場所で保管すること。
- ・有効期限：2年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社ドリームファクトリー

住所：東京都千代田区神田美土代町7住友不動産神田ビル