


DOCTORAIR

100

取扱説明書

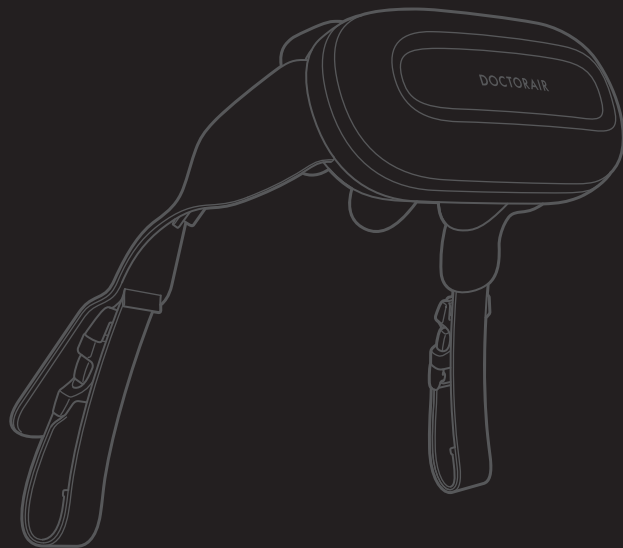

3Dネックマッサージャープレミアム SMART

このたびはドクターエア製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。

- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- 取扱説明書に記載しているイラストはイメージ図です。

目次

安全のために	3
各部の名称と機能	10
充電する	13
本製品を使用する	16
お手入れと保管について	24
故障かなと思ったら	28
主な仕様	30
保証とアフターサービス	32

安全のために

安全上のご注意

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

警告・注意について 誤った取扱いをしたときに生じる危険や 損害の程度を区分し、説明しています。	
 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
図記号の例 お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。	
 禁止	してはいけないこと。
 必ず守る	必ず行うこと。

警告

●医師からマッサージを禁止されている方は使用しない。(症状を悪化させる原因)

例:心臓疾患・急性疾患・有熱性疾患・血圧異常・血栓(塞栓)症・重度の動脈瘤

- ・急性静脈瘤・各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)
- ・けいつい(頸椎)症・飲酒や薬を服用中の方・化学繊維でかぶれた経験のある方
- ・健康が特にすぐれない方・疲労が激しい方など

●自ら意思表示ができない方や操作が行えない方には使用させない。(事故・ケガの原因)

●使用中はほかの作業を行わない。(事故・ケガの原因)

●アクセサリーなどの硬いものやベルト、マフラー、首元に装飾のある服などを着用して使用しない。(事故・ケガの原因)

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、AC100V以外での使用はしない。(火災の原因)

●乳幼児や小さなお子様に本製品を使用させたり、遊ばせたりしない。(事故・ケガの原因)

●ストーブなどの火気のそばやホットカーペットの上で使用しない。(火災・故障の原因)

●タバコを吸いながら使用しない。(火災・故障の原因)

●こたつの中や暖房器具の近く、ホットカーペットの上で使用しない。(事故・感電の原因)

●本体のカバーを故意に外したり、破いたり、切ったりしない。(事故・ケガの原因)

●本体や充電用ジャック (TYPE-C) の隙間に、ピンのように鋭いものや異物を挿し込まない。(火災・感電・故障の原因)

●USBコードを本体やACアダプタに巻き付けない。(断線による火災・感電の原因)

警告

●USBコードおよびACアダプタを破損するようなことはしない。(火災・感電の原因)

・傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじ曲げる、束ねて使用する、重いものをのせる、はさみこむ

●USBコードを充電ジャック (TYPE-C) またはACアダプタから抜くときは、引っ張らない。(絶縁不良になり、火災・感電・ショートによる発火の原因)

●首の周辺をマッサージするときは特に注意し、首の前方には使用しない。(事故・ケガの原因)

●次の部位には使用しない。

- ・整形手術をした部位
- ・皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- ・皮膚トラブルのある部位 例:アトピー性皮膚炎、顔面黒皮症、皮膚の炎症、かゆみやほてりのある部位、物理的刺激などによる病的なシミやアザ、敏感肌、ケロイド体質など
- ・痛覚、知覚障害を起こしている部位・胸部・脇部・骨折部位・関節部位

充電池について

●本製品はリチウムイオン電池内蔵のため、次のようなことは絶対にしない。

- ・加熱や火中投下
- ・高温環境でのご使用、充電、放置
- ・こたつや布団に入れてのご使用、充電
- ・直射日光が当たる場所や、炎天下の車内など高温になる場所での使用、充電

●性能の劣化したリチウムイオン電池を使用しない。

性能の劣化したリチウムイオン電池の使用を続けると、発煙・発火など重大な事故につながるおそれがあります。電池の性能の劣化や異常を感じたときは使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

●下記のような異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口まで相談する。

- ・電池の膨張・異音・異臭
- ・充電しても動作しない
- ・極端に使用時間が短くなった
- ・充電中に熱くなる



禁止



禁止

警告

 禁止	電源について ●濡れた手でACアダプタをコンセントから抜き差ししない。(感電の原因) ●電源プラグ・USBコードを破損するようなことはしない。(感電、ショートによる発火・火災の原因) 傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げる、ねじる、重いものをのせる、本体に巻き付ける、束ねて使用する ●ACアダプタが傷んだり、コンセントへの挿し込みがゆるいときは使用しない。
 必ず守る	●次の方は必ず医師と相談の上、使用する。 ・ペースメーカーなどの電磁障害の受けやすい体内植え込み型医用電子機器を使用している方 ・悪性腫瘍のある方 ・心臓に障害のある方 ・脚に重度の血行障害がある方 ・温度感覚喪失が認められる方 ・妊娠中や妊娠の可能性のある方、出産直後の方 ・糖尿病など、高度の末しょう循環障害による知覚障害のある方 ・治療部位に創傷のある方 ・安静を必要とする方や体力の衰えた方 ・体温38℃以上(有熱期)の方 例:急性炎症症状(倦怠期、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ・骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れの急性(疼痛性)疾患のある方 ・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方 ・腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方 ・背骨に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ・医師の治療を受けている方や、上記以外に特に身体の異常を感じている方 ●使用前に布地が破れていないか必ず確認する。どんなに小さな破れでも見つけた場合は使用せず、ドクターエアお客様相談窓口にご相談する。(ケガ・事故の原因) ●使用中に身体に異常があらわれたり感じたりした場合や、使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。(事故・体調不良の原因)

警告

 必ず守る	●USBコードのコネクタやACアダプタは根元まで確実に挿し込む。(感電や発熱による火災の原因) ●使用前に操作ボタンが正常に動作することを確認する。しばらく使用しなかった場合も必ず確認する。 ●指定の電源、電圧で充電する。(火災・やけど・感電の原因) 充電する際はACアダプタやUSBコードの使用をお確かめのうえ、必ず指定のものを使用してください。取扱いを誤ったために生じたACアダプタなどの故障については弊社では責任を負いかねます。
 電源プラグを抜く	●異常・故障時にはただちに使用を中止し、本体の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く。(発煙、発火、感電の原因) 異常・故障例： 本体、USBコードが傷んでいたり、変形したり、異常音や異臭・発煙、異常に熱い場合、直ちにドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。(故障の原因) ●雷が鳴り始めたらただちに電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(故障の原因) ●お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(感電の原因) ●使用時以外は電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜く。(思わぬ事故の原因)
 ぬれ手禁止	●濡れた手で本体や、電源コードおよびACアダプタに触れない。(感電・故障の原因)
 風呂、シャワー室での使用禁止	●本製品は防水仕様ではないため、風呂場や洗面所では使用しない。(漏電による感電・発火の原因)
 分解禁止	●分解・改造・修理は絶対にしない。(発火・事故・故障の原因) 内蔵されたリチウムイオン電池の交換は危険を伴いますので、絶対に行わないでください。

注意



禁止

- 用途以外の目的で使用しない。(ケガ・体調不良の原因)
- 湿疹が出ている時は使用しない。
- 使用時間は1回10分以内としてください。
また、同一箇所への連続使用は5分以内とし、使用部位を適宜変更してください。(逆効果・ケガの原因)
- マッサージ以外の目的で使用しない。(ケガ・体調不良の原因)
- 他の治療器と同時に使用しない。(事故・体調不良の原因)
- 本体の上ののったり、立ったりしない。(ケガ・故障の原因)
- 使用中に眠らない。(事故・ケガの原因)
- 本製品を落としたり、重いものをのせたり、強い衝撃を加えたりしない。(火災や感電、故障の原因)
- 使用中、もみ玉に故意に強く押し当てるなどの無理な力をかけない。(ケガ・体調不良・故障の原因)
- 飲酒中や飲酒後に使用しない。(事故・ケガの原因)
- 使用中にほかの作業を行わない。(事故・ケガの原因)
- 直接肌に触れての使用はしない。(ケガの原因)



必ず守る

- 電源タップを使用する際は、必ず定格容量を守る。(火災・焼損の原因)
- 食前・食後は十分に時間を置いてから使用する。(体調不良の原因)
- 使い始めは一番弱い刺激でマッサージを行う。
- 使用後は電源が切れていることを確認し、ACアダプタをコンセントから抜く。

性能及び安全性に関する規格

性能

項目	仕様	備考
もみ回数：もみ機能をもつ機器	低速：21 回／分 (±3 回) 通常：31 回／分 (±3 回)	試験方法：JIS T2002

その他の性能

項目	仕様	備考
タイマー	10 分(±10%)	試験方法：JIS T2002


使用目的又は効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

※上記以外の目的には使用しないでください。


各部の名称と機能

本体

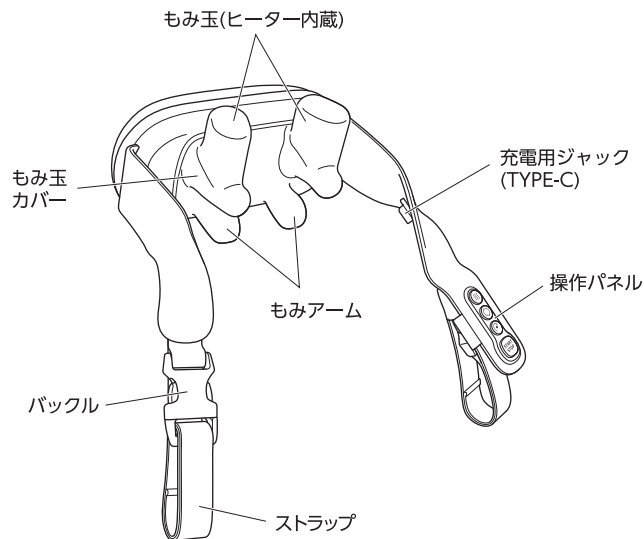

- ※もみ玉カバーは洗濯可能です。お手入れ方法はこちらもみ玉カバーについている洗濯表示タグをご確認ください。
- ※本体は洗濯不可です。お手入れ方法は24ページをご確認ください。
- ※もみ玉カバーを外した状態で使用しないでください。

操作パネル

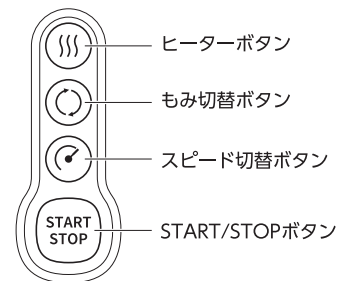

ヒーターボタン

押すたびにヒーターのON/OFFが切り替わります。



もみ切替ボタン

押すたびにもみ玉の回転方向および動作が切り替わります。



スピード切替ボタン


押すたびにもみ玉の回転スピードが切り替わります。




START/STOPボタン

短押しでマッサージがスタートし、短押しでマッサージがストップします。

付属品

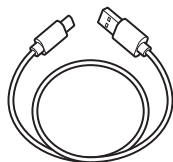

USBコード
(TYPE-C (A-C))

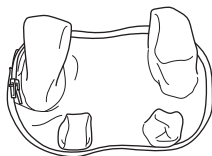

もみ玉カバー
(本体取付済)




取扱説明書
(保証書付)

充電する

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

- 充電中は動作しません。動作中に充電を行うと、自動的に電源が切れ、充電が開始されます。
- 初めての充電や長期間ご使用にならなかった後に充電する場合、電池持続時間が短い場合があります。
- 以下の症状が確認された場合は、ご使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口にご相談ください。
 - ・ご使用前に、本体や付属品に損傷がないかをご確認いただき、異常が発見されたとき
 - ・充電を行っても十分に充電できないとき
 - ・電池持続時間が短いとき

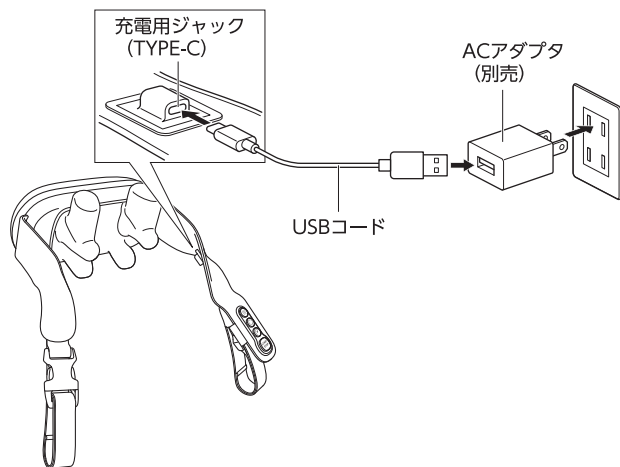

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。

- 充電が開始されると、もみ玉のLEDが青色に点灯し、満充電になるともみ玉のLEDは消灯します。
- 電池残量が少なくなると、もみ玉のLEDは青色に点滅します。

※充電中は動作しません。

- 1 USBコード (TYPE-C (A-C)) を本体の充電用ジャック (TYPE-C) に接続します。
奥までしっかりと挿し込んでください。
- 2 USBコード (TYPE-C (A-C)) をお持ちのACアダプタに挿し込んで、コンセントにACアダプタの電源プラグを挿し込みます。

ご注意

- 市販のUSB対応ACアダプタをご使用の際は、定格出力DC5.0V 2.0A以上のACアダプタを必ず使用してください。
※USB PD PPS規格のACアダプタは非対応です。
- ご使用になるACアダプタに損傷がないか確認し、異常のあるACアダプタは絶対に使用しないでください。また、お使いになるACアダプタの取扱説明書もあわせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 電気用品安全法に適合し、PSEマークが表示された充電器をご使用ください。
不正規な充電器を使用すると、充電器や製品が高温になる恐れがあります。
- 充電した状態で外出はしないでください。
- 充電は、なるべく製品の様子が確認できる時間と安全な場所で行い、充電が完了したらプラグを抜いてください。また、充電コネクタの破損や異物の付着にも注意してください。
- UL認証番号が印字されているUSBコードを必ず使用してください。

- 3 充電が完了したらUSBコード (TYPE-C (A-C)) を本体と充電器の両方から外してください。

本製品を使用する


ご使用になる前に

- ご使用前に、START/STOPボタンやタイマー機能が正常に動作することを確認してください。しばらくご使用にならなかった場合も必ず確認してください。
- ご使用前に、必ず布地が破れていないか、ファスナーが開いていないかを確認してください。どんな小さな破れでも、見つけた場合は絶対に使用しないでください。
- 初めてのご使用前には充電が必要です。くわしくは「充電する」(13ページ)をご覧ください。
- 機器を連続して動作させるような使い方はおやめください。
- もみ玉カバーを外した状態で使用しないでください。もみ玉カバーが破れた場合は使用を中止し、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。
- 開梱時は手持ちで使用できるよう、バックルが固定された状態になっています。手持ちで使用する場合は、バックルを外さずにご使用ください。

手で持って使用する場合


※開梱時のストラップの長さが合わない場合は、ストラップの長さを調整し、ご自身にとって使いやすい長さに合わせてから使用してください。

※詳しくは「ストラップの長さを調整する」(19ページ)をご覧ください。

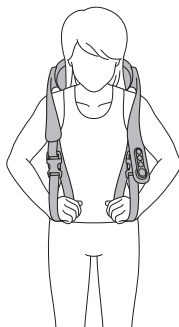

ハンズフリーで使用する場合

- 1 左右のバックルをはずしてから、本体を使用部位に当てます。外したバックルを体の前に揃え、両手で持ちます。
- 2 ストラップをひねらないようにバックルを背中に回し、カチッと音がするまで差し込みます。

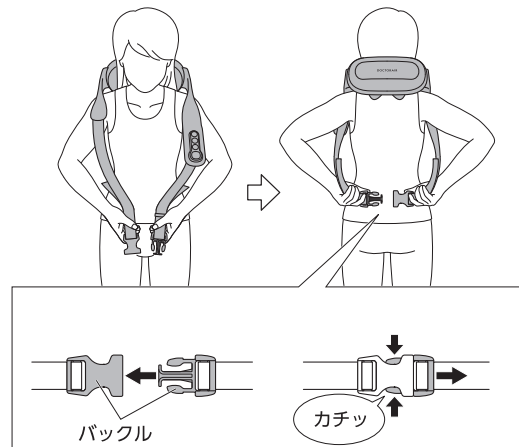


3 ストラップを引っ張って固定します。

ストラップが緩いと感じた場合は、下のイラストのように左右のストラップを交互に引っ張ると、しっかりと固定することができます。

ご注意

- ・ 圧迫しすぎないようにご注意ください。

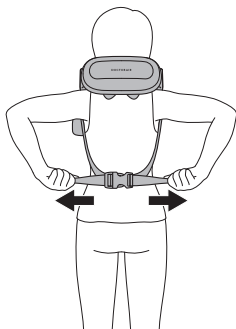


ストラップの長さを調整する

※バックルを外した状態で、ストラップの長さを調整してください。


ストラップを短くする

- 1 バックルをストラップに対して垂直にします。
- 2 バックルを持ち、ストラップの端を矢印の方向に引っ張ります。

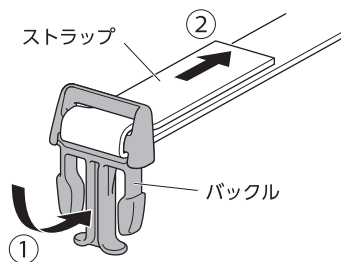

ストラップを長くする

- 1 バックルをストラップに対して垂直にします。
- 2 ストラップを持ち、バックルを矢印の方向に動かします。

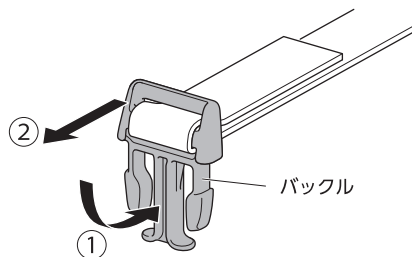

※イラストは、差し込み側のバックルが付いたストラップの例です。
受け側のバックルが付いたストラップの場合は、左右が逆になります。

マッサージを行う

- 1 **START STOP** ボタンを押して、電源を入れます。
もみ玉が下方方向に回転し、マッサージが開始します。もみアームはもみ玉の回転スピードと連動して、上下に動きます。

もみ玉の回転方向と動作を変更する

⌚ ボタンを押して、もみ玉の回転方向と動作を切り替えます。
押すたびに次のように動作が変わります。

もみ下げ→もみ上げ→指圧→もみ下げ…

- 「指圧」モードでは、もみ玉が掴むタイミングで約1秒停止し、その後に再びもみ動作を再開します。"グイッ"と押し込まれるような刺激を体感できます。



もみ玉の回転スピードを変更する

-  ボタンを押して、もみ玉の回転スピードを切り替えます。
押すたびに次のようにスピードが変わります。
通常→低速→通常…

ヒーターのオン/オフを切り替える

-  ボタンを押して、ヒーターのオン/オフを切り替えます。
- ・ヒーターオン：もみ玉 赤色点灯
 - ・ヒーターオフ：もみ玉 青色点灯

- 2** 本体を使用したい部分に当て、マッサージをします。ご使用の際はストラップを持つと便利です。

ご注意

- ・使い始めは弱い刺激(低速)から開始してください。
- ・首周辺をマッサージする際は、強く押し当てないよう十分に注意してください。
また、首の前方・頭部・胸部・陰部には使用しないでください。
- ・マッサージ器本体の上に立ってご使用になったり、全体重がかかるようなご使用はおやめください。
- ・髪の長い方がご使用する際は、髪を束ねるなどしてマッサージ器に髪がかからないようにしてください。マッサージ器との摩擦や擦れなどにより、髪の毛をいためる恐れがあります。

約10分後に自動でマッサージが終了します。
途中でコースを切り替えても、約10分で停止します。

途中でマッサージを終了するには

-  ボタンを押してください。

ご使用中にもみ玉のLEDが点滅したら

電池残量が少なくなっています。すぐに充電を行ってください。

安全装置について

本製品は安全のため、内部に安全装置を有しております。安全装置は主に次の場合に作動し、電源が自動で切れます。

- ・連続使用などにより、モーターやACアダプターの内部温度が規定より高くなった場合
- ・もみ玉など(施療部)に高い負荷がかかった場合
- ・安全上で何らかの異常を感知した場合
安全装置は、モーターやACアダプターの内部温度が正常な状態になると、再度使用が可能となります。ご使用中に動作が停止し、電源ボタンを押しても作動しない場合は、1時間程度経過した後に再度電源を入れてください。

お手入れと保管について

お手入れについて

ご注意

- お手入れの前に、必ず電源を切ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤や薬品類、熱湯は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- もみ玉カバーを洗濯する際は、もみ玉カバーに付いている洗濯表示タグをご確認ください。

ご使用後、本体に汗が残らないよう、やわらかい布でしっかりと拭き取ってください。


汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞ったスポンジや、やわらかい布で拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

もみ玉カバーについて

もみ玉カバーは取り外すことができます。汚れなどが気になるときは、取り外して洗濯してください。


もみ玉カバーを取り外す

施術部の周りのファスナーを開け、もみ玉カバーを取り外します。

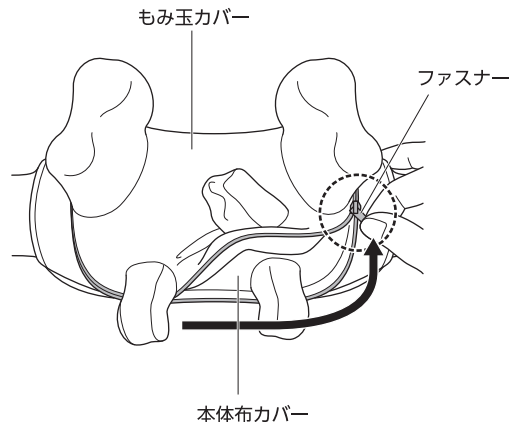

もみ玉カバーを取り付ける

施術部にもみ玉カバーを取り付け、ファスナーを締めます。

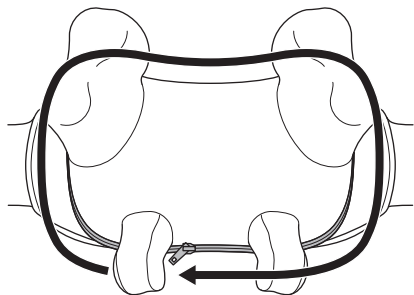

保管について

- 保管の際は、必ず電源を切ってください。
- 汚れやほこりをよく拭き取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けて保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所で保管しないでください。
- 長期間保管される場合は、汚れやほこりが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- USBコードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 製品を安全な場所で使用・保管しましょう。

廃棄する場合は

本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳細内容は、各地方自治体にお問い合わせください。その他の付属品も、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

故障かなと思ったら

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	- 安全装置が作動している場合があります。1時間ほど置いてから再度お試しください。 - 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
もみ玉の動きが遅い・弱い	十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
充電できない、充電しても電池持続時間が短い	- 周囲の温度が極端に低い場合または高い場合、正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境下で充電を行ってください。 - 初めての充電時や長期間未使用後の充電時は、電池持続時間が短い場合があります。充電と使用を何度か繰り返すと正常に戻る場合があります。 - ACアダプタで充電する場合は、定格出力DC5.0V 2.0A以上を必ず使用してください。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応です。 - 付属品以外のUSBコードを使用する場合は、定格2.0A以上に対応したUL認証番号が印字されているUSBコードを必ず使用してください。
突然停止した	- タイマーにより約10分で自動的に停止します。 - もみ玉に負荷がかかったり内部温度が上昇すると、安全装置により動作が一時停止します。1時間ほど置いてから、再度お試しください。

症状	確認していただくこと
もみ玉のヒーターが温まらない	- お使いになる環境によっては、ヒーターが最高温度に達しない場合があります。 - 十分に充電されていない可能性があります。再度充電を行ってください。
使用時に製品から音がする	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。異常ではありません。

上記で解決しない場合は、ドクターエアお客様相談窓口までご相談ください。

主な仕様

製品名	3Dネックマッサージャープレミアム SMART
型番	MN-10
種別	機械器具 77 バイブレーター
一般名称	【家庭用電気マッサージ器】
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	308AHBZX00014000
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用。 一般家庭で使用するこゝと。
電源	充電式リチウムイオン電池内蔵 DC 7.2V 2000 mAh
定格入力	AC100 V 50Hz/60HZ
定格消費電力	17.7W(ヒーターのみ2.6W)
充電時間	約3時間（満充電まで）
定格仕様時間 (タイマー時間)	約10分
充電可能回数	400回
もみ回数	通常：31 回 / 分 (± 3 回)
	低速：21 回 / 分 (± 3 回)
ヒーター使用時の 生地カバーの表面 温度	42℃(±3℃)環境温度25℃換算

騒音	55dB 以下
寸法	W255× D145× H135mm
質量	1.2kg 以下
材質	ABS樹脂、ポリアエステル、 スパンデックス、ポリアセタル、ナイロン
付属品	USBコード（TYPE-C（A-C））、 取扱説明書(保証書付)、もみ玉カバー(本体取付済)
使用環境温度	10 ～ 40℃ 、 10 ～ 85% R.H. 以下
保存環境温度	－ 10℃～＋ 60℃、85% R.H. 以下
生産国	中国

※実際の時間および回数・温度は、使用状況・使用環境により異なります。

※電池残量によって回転数が変わる事があります。

※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ
をご使用ください。

※USBコードに関するご注意

本製品は医療機器のため、必ず下記の指定USBコード（UL適合品）
のみをご使用ください。

・指定USBコード：UL認証番号が印字されているUSBコード

指定以外のUSBコードを使用した場合、正常に動作しないほか、火災・感電・故障の原因となるおそれがあります。

また、指定以外のUSBコードの使用により生じた不具合または事故
については、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

USBコードを紛失または破損した場合は、ドクターエアお客様相談
窓口までご相談ください。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

保証書

お買い上げの際に「お買い上げ日」、「販売店名」欄の記入をご確認ください。

また内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったら」(28ページ)をご確認ください。
直らない場合や、同じような症状がたびたび生じる場合は電源コードを外し、次の内容をお買い求め先にご連絡ください。

- ・お買い上げ日
- ・製品型名:MN-10
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)

修理に関する
お問い合わせ



保証期間内に修理を依頼される場合は

保証書の規定に則って修理いたします。なお、保証期間中でも有料となる場合がありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間:保証書に記載

保証期間終了後は

診断をして修理できる場合はご要望により、有料にて修理いたします。修理料金は次の内容で構成されています。

- ・技術料:診断・修理・調整・点検などの費用
- ・部品代:修理に使用した部品および補助材料代
- ・修理品の運賃:修理品の往復の送料

補修用性能部品の保有期間

本製品の機能を維持するために必要な部品保有期間の目安は、製造終了から5年です。部品保有期間は目安であり、実際の期間は若干異なる場合がございます。保有期間の終了をもって、保守対応は終了します。

その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談およびご不明な点については、お買い求め先またはドクターエアお客様相談窓口までお問い合わせください。

公共交通機関で使用する場合

事故を避けるため、持込規則を確認し、規則に従ってください。

定期点検のお願い

本製品の定期点検をお願いします	
こんな症状はありませんか?	ご使用中止
●煙が出たり、異常なおいや音が出る ●USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする ●内部に異物や水が入った ●本体に変形や破損がある ●その他異常がある	故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い上げ販売店、またはドクターエアお客様ご相談窓口にて点検、修理をご相談ください。